


El cuidado perfecto

Higiene que hace que su sistema de aspiración dure más.



Indicaciones para el cuidado de sistemas de aspiración con Orotol plus y MD 555 cleaner

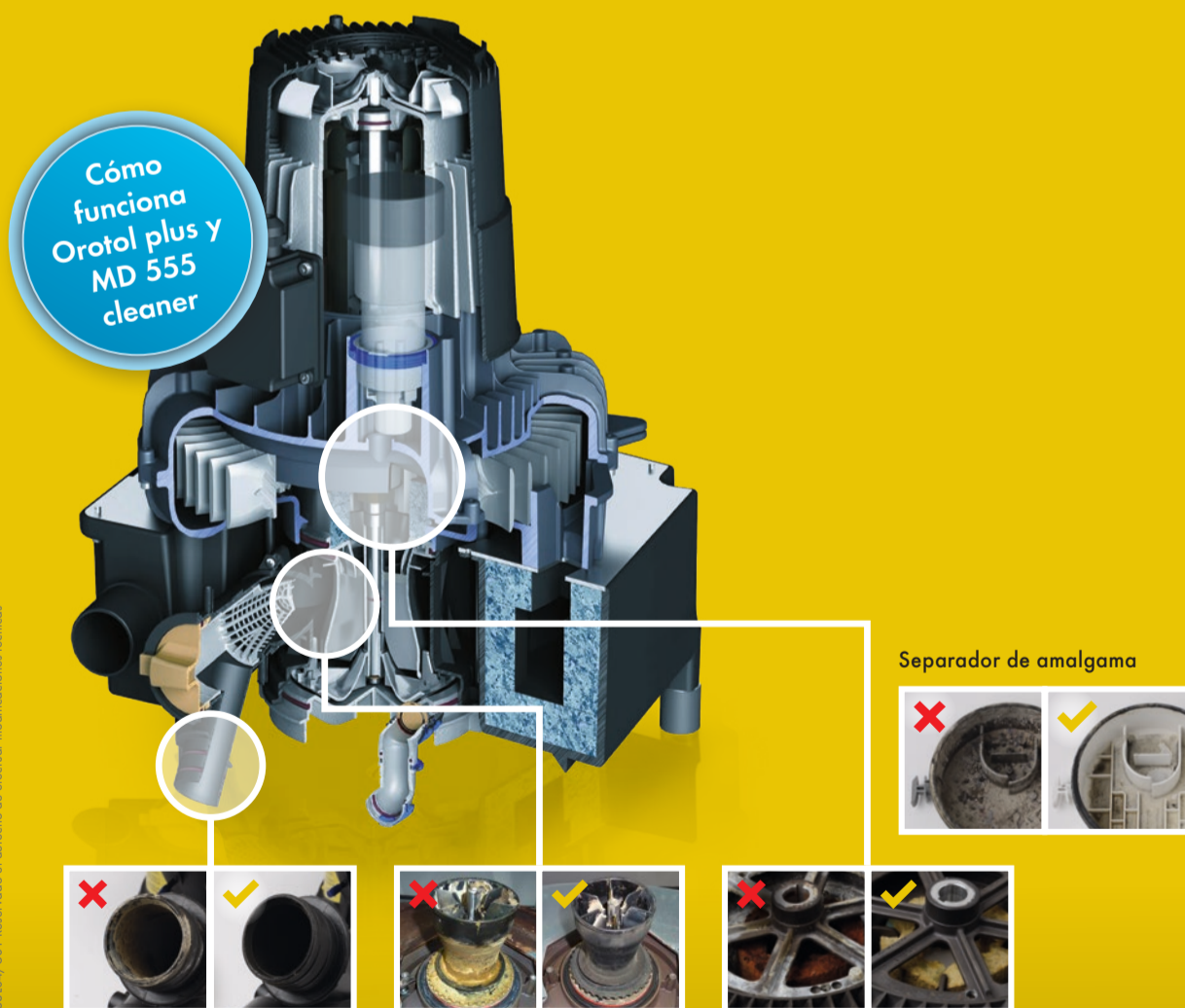

Importante

El uso de productos inadecuados puede dañar el equipo o provocar fallos en su funcionamiento. Esto puede invalidar las reclamaciones de garantía.

Nunca utilice agentes de limpieza espumantes, productos abrasivos ni productos que contengan cloro o disolventes (por ejemplo, acetona).

👉 IMPORTANTE:

Cuidado óptimo de su sistema de aspiración: usando Orotol plus, Orotol plus pH 7, Orotol ultra, MD 555 cleaner y MD 555 cleaner organic, así como el sistema de dosificación OroCup.

Solo estos productos han sido probados y aprobados para su uso en los sistemas de aspiración Dürr Dental.



Desinfección diaria con Orotol plus u Orotol plus pH 7

1 - 2 veces por día*



*en días de atención al paciente



Ver tutorial



1 Limpieza previa



Aspirar 2 litros de agua (PRECAUCIÓN: nunca agregue agua al sistema a una temperatura superior a 35°C)

Los concentrados Orotol plus y Orotol plus pH 7 son la solución perfecta para la desinfección, desodorización, limpieza y cuidado simultáneos de todos los sistemas de aspiración y separadores de amalgama.

Usar al finalizar la jornada laboral o dos veces al día (al mediodía y por la noche) si los niveles de contaminación son elevados.

2 Dosificación del 2 %



Añadir 40 ml (2 tapones) de Orotol plus y rellenar con agua del grifo hasta la marca de 2 litros.

3 Desinfección sistema de aspiración



Conectar las mangueras y aspirar 1 litro de solución hasta que se active el Auto-Stop.

4 Escupidera



Añadir el litro restante de la solución en la escupidera.

5 Tiempo de actuación



Espectro de acción: Bactericida, levurocida, virucida limitado (virus encapsulado, incluyendo HBV, HCV, HIV y coronavirus), así como adenovirus y norovirus

Dejar actuar durante 5 - 60 Min.

6 Enjuague de la unidad de tratamiento



Transcurrido el tiempo de actuación, aspirar 2 litros de agua.

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

Limpieza semanal con MD 555 cleaner o MD 555 cleaner organic

Mín. 2 x / semana




* Diariamente si el tiempo de contacto es más corto



Ver tutorial



1 Limpieza previa

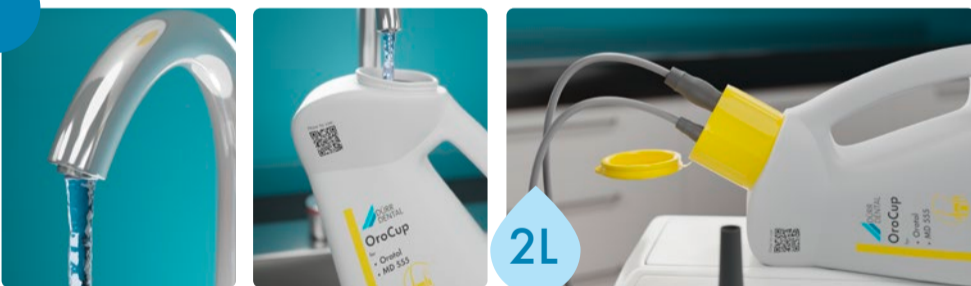


Aclarar la unidad con 2 litros de agua fría con OroCup.

El MD 555 cleaner y el MD 555 cleaner organic son limpiadores especiales concentrados y antiespumantes para todo tipo de sistemas de aspiración y separadores de amalgama. Poseen un alto poder descalcificador para eliminar depósitos, incrustaciones y sedimentaciones.

Ideal en combinación con Orotol plus. Aplicar con OroCup 1 ó 2 veces por semana, preferiblemente a media mañana. En casos más severos, aplicar cada día hasta que mejore el problema.

2 Dosificación del 5 %

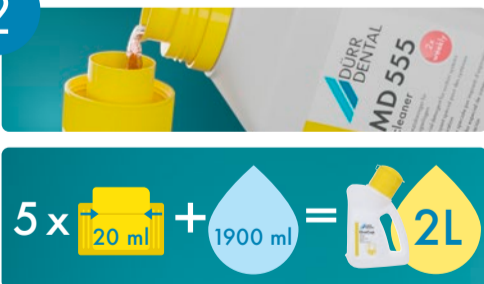

Añadir 100 ml (5 tapones) de MD555 cleaner y rellenar con agua del grifo hasta la marca de 2 litros.

3 Limpieza sistema de aspiración



Conectar las mangueras y aspirar 1 litro de la solución hasta que se active el Auto-Stop

4 Escupidera



Añadir el litro restante de la solución en la escupidera.

5 Tiempo de actuación



Dejar actuar durante 30 - 120 Min.



Dejar actuar durante 5 - 15 Min.

IMPORTANTE: Nunca dejar actuar durante la noche

6 Enjuague de la unidad de tratamiento



Transcurrido el tiempo de actuación, aspirar 2 litros de agua.

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN